

PiccoJect™

2ステップで投与が完結する
単回使用のオートインジェクター



ニプロはHASELMEIER社のPiccoJect™を
日本で独占的に代理販売しています

握りやすい形状&小型サイズ

バネを並列配置することで実現

大きなドラッグ・ウィンドウ

使用前の目視確認が容易

少ない部品点数

総部品はわずか8点、安定した調達が可能

サステナビリティ対応

CO₂排出量の少ない電力で製造

仕様

仕様	PiccoJect™-100	PiccoJect™-225
部品点数	プラスチック部品5点、バネ2点、金属部品1点	
一次容器	1mlのガラスまたはプラスチック製シリンジ	2.25mlのガラスまたはプラスチック製シリンジ
シリンジのフランジ形状	スモールラウンドフランジまたはカットフランジ	
充填可能量	0.2 - 1mL	0.6 - 2mL
投与時間*	<10秒	<15秒
粘度**	最大20cP	
針の刺入深さ	6 mm (中央値)、カスタマイズ可能	
針のゲージ	27G および 29G	
重量	26g (シリンジを除く)	34g (シリンジを除く)



*、** 投与時間および粘度は、針径および充填量に依存します。

操作手順

- 1 キャップを本体から取り外します。
- 2 投与部 (腹部または大腿部) に沿わせます。
- 3 ゆっくりと押し下げます。
(ニードルガードが下がり、カチッという音とクリック感があります)
- 4 そのまま投与が終了するのを待ちます。
(ドラッグ・ウィンドウとステータス・インジケータが黄色に変わります)
- 5 インジケータの変化後さらに3秒待つと、投与が完了します。
- 6 皮膚からオートインジェクターを離し、そのまま専用のごみ箱に捨てます。



〈問い合わせ先〉

ニプロ株式会社 ファーマパッケージング事業部

[本 社] 〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3-26 TEL:06-6310-6571

[東京営業部] 〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 TEL:03-5684-5611

[HP] <https://www.nipro-pharmapackaging.jp/>

